



Il Tocco Morbido della Luce

IncontiLase™

Trattamento laser per l'incontinenza urinaria

- Soluzione per incontinenza mista e da stress lieve e moderata
- Rafforzamento foto-termico della parete anteriore della vagina per un maggior supporto uretrale e della vescica
- Senza incisioni, minimamente invasivo
- Non è necessaria alcuna anestesia
- Sicuro, ambulatoriale, veloce
- Elevato tasso di successo e di soddisfazione della paziente





Che cosa è IncontiLase™ ?

IncontiLase™ è una terapia laser Er:YAG innovativa, unica, non invasiva e brevettata per l'incontinenza urinaria. Si basa sul rafforzamento foto-termico della parete anteriore della vagina per un maggior supporto uretrale e della vescica. Le indicazioni per la terapia IncontiLase sono l'incontinenza urinaria mista e da stress (SUI) lieve e moderata. Studi clinici preliminari mostrano che è una procedura efficace e sicura.

Come funziona IncontiLase™ ?

Il trattamento IncontiLase™ si basa su effetti termici laser-indotti precisamente controllati sul tessuto mucoso nella regione del vestibolo e dell'orifizio uretrale, così come nell'area lungo la parete anteriore della vagina.

Il laser utilizzato nelle prove cliniche di IncontiLase™ è un Er:YAG 2940 nm, con soluzioni tecnologiche brevettate che emettono energia laser controllata sulla mucosa vaginale agendo sulla fascia endopelvica ricca di collagene. Studi clinici hanno dimostrato che lo stimolo al rimodellamento e neogenesi collagenica portano al rafforzamento dei tessuti irradiati, ed il ripristino di una normale continenza.

Gli straordinari vantaggi di IncontiLase™ per le tue pazienti

Per la grande maggioranza delle pazienti incluse negli studi, una singola seduta è stata sufficiente per migliorare l'incontinenza urinaria da stress lieve o moderata. Se necessario, il trattamento è stato ripetuto dopo un mese.

Non sono necessarie speciali preparazioni pre trattamento o precauzioni post trattamento. Le pazienti sono potute tornare immediatamente alle loro normali

attività quotidiane. Vantaggi ulteriori di IncontiLase™ sono che la procedura non prevede incisioni ed è effettivamente indolore, non ci sono tagli, sanguinamento o suture.

La guarigione è estremamente veloce senza la necessità di utilizzo di analgesici o antibiotici.

Promettenti risultati clinici

I più recenti risultati scientifici di IncontiLase™, presentati dal Dr. Rivera e dal Dr. Fistonc, mostrano un eccellente miglioramento nell'incontinenza urinaria da stress lieve e moderata.


L'efficacia è stata valutata mediante la

nell'uretra e nello stato del collo della vescica.

Il 90% delle pazienti con SUI lieve ed il 76% delle pazienti con SUI moderata necessitano di un solo trattamento IncontiLase™ per manifestare un miglioramento. In totale, il 95% di tutte le pazienti non riferivano incontinenza 12 mesi dopo il trattamento, mentre il 5% ancora aveva una lieve incontinenza da stress.

Iniziare con IncontiLase™

Il training di formazione sarà fornito da Santec Academy (www.santecsr.it). Santec Academy fornirà le basi teoriche e la

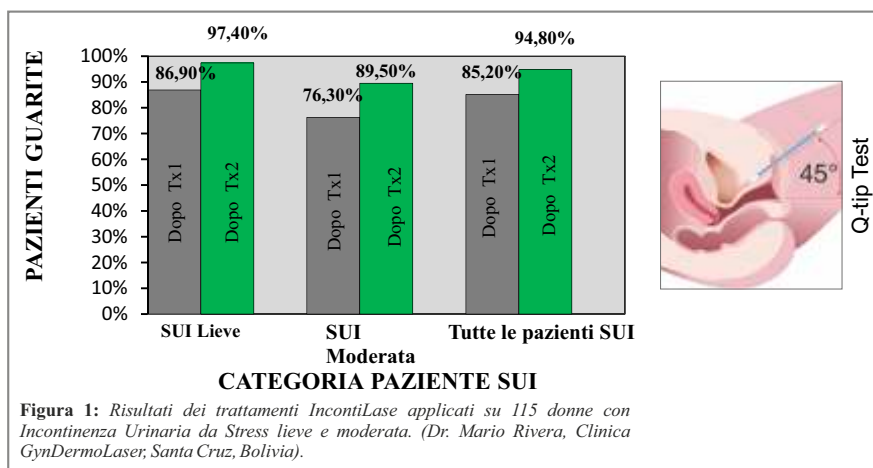

valutazione soggettiva dei sintomi da parte delle pazienti attraverso questionari standard e con misurazioni oggettive come il Q-tip. Le misurazioni Q-tip durante la manovra di Valsalva evidenziavano un decremento medio di 20° dell'angolo Q-tip, mostrando miglioramenti oggettivi

formazione pratica per poter conoscere e quindi utilizzare nella pratica clinica i principi fisici e le interazioni con i tessuti del sistema laser Er:YAG. In un workshop dedicato all'utilizzo del laser Er:YAG i partecipanti saranno coinvolti in lezioni frontali essenziali e dimostrazioni pratiche.



Sede legale: Via A. Tassoni, 16/4 - 42100 Reggio Emilia
 Sede operativa: Via Leonardo da Vinci, 4/11- 57123 Livorno
 Tel. 0586 444539
www.santecsr.it E-mail info@santecsr.it